

Ušní krém Ginkgo Care



Je kosmetický přípravek s aktivními rostlinnými přísadami pocházejícími ze stromu Ginkgo biloba. Krém slouží k ochraně kůže v místě kontaktu se sluchadly nebo s brýlemi.

Krém Ginkgo Care se aplikuje podle potřeby na suchou čistou kůži ráno nebo i večer.

Ginkgo Care zklidňuje a chrání pokožku v místech, kde přichází do kontaktu se sluchadly nebo s brýlemi. Odstraňuje případné svědění a problémy související s přecitlivostí kůže na cizí předměty.

Uspadňuje vsunutí a vysunutí sluchadla a snižuje vznik zpětné vazby projevující se jako intenzivní pískot. Pomáhá ke kvalitnímu usazení sluchadla nebo ušní olivy ve zvukovodu.

Pomáhá udržet sluchadlo a jeho části v čistotě, protože zbytky ušního mazu na sluchadle neztvrdnou a dají se snadno odstranit.

Krém Ginkgo Care neobsahuje žádná barviva ani vůně a nezpůsobuje žádné komplikace ani při pravidelném používání. Dermatologicky testováno.

Upozornění:

- A) Nepoužívejte tento přípravek, pokud máte velmi citlivou kůži. Citlivost na Ginkgo Care otestujte nanesením krému na kousek náplasti a následným přilepením na kůži ještě předtím, než začnete tento lubrikant používat.
- B) Je velmi nepravděpodobné, že by krém Ginkgo Care měl vliv na umělé materiály používané v konstrukci sluchadel a brýlí. Nicméně pokud zjistíte změny na vašich brýlích nebo sluchadlech způsobené prokazatelně působením Ginkgo Care, informujte svého ušního nebo očního specialistu.
- C) Pokud je krém Ginkgo Care delší dobu vystaven působení vzduchu, způsobí rostlinné výtažky změnu zabarvení krému do žlutohnědého tónu. Tato změna je zcela v normě a nemá žádný negativní vliv na funkci přípravku.

Skladovatelnost:

Viz štítek na obalové krabičce. Spotřebujte do tří měsíců po otevření tuby.

Udržujte přípravek na suchém a chladném místě při teplotě 5 až 30 °C. Nevystavujte přímému působení slunce.