

Návod na použití

Sluchátka EARIS pro poslech TV



Důležitá bezpečnostní upozornění

Než budete nastavovat a používat toto zařízení, pečlivě a důkladně si prosím přečtěte tyto pokyny.

- Tuto uživatelskou příručku mějte na spolehlivém místě, aby se k ní vždy mohli dostat jiní uživatelé.
- Zařízení nepoužívejte, pokud je zjevně poškozeno.
- Zařízení používejte pouze na místech, kde je povolena rádiová technologie 2,4 GHz.
- Zařízení a zvláště elektrická napájecí jednotka jsou určeny k provozu pouze na suchých místech v interiéru. Funkce je zaručena pouze při pokojových teplotách 5 °C až 35 °C.
- Výrobek, obal a příslušenství držte mimo dosah dětí a domácích zvířat, abyste předešli nehodám.
- Se zařízením a příslušenstvím vždy zacházejte opatrně a nedávejte jej do znečištěného či prašného prostoru.
- Vysílač a přijímač pravidelně čistěte. Z hygienických důvodů také pravidelně čistěte měkké silikonové pecky. Pecky vyměňujte za ty, které jsou k dispozici jako příslušenství.
- Nátery a leštidla na nábytek mohou chemicky působit na pryžové nohy vysílače a způsobit poškození povrchu vašeho nábytku.
- K napájení vysílače používejte pouze dodanou elektrickou napájecí jednotku.
- Pokud nebudete několik dní přítomni, doporučujeme odpojit elektrickou napájecí jednotku z elektrické zásuvky.

Pozor:

Váš přijímač může být nastaven na velmi vysokou hlasitost. Pro ochranu vašeho vlastního sluchu nebo sluchu lidí s běžným sluchem, zvláště dětí, před poškozením způsobeným nadměrnou hlasitostí dodržujte prosím následující pokyny:

1. Než začnete přijímač používat, nastavte jej na nízkou hlasitost.
2. Během používání upravte hlasitost na úroveň, která je vám pohodlná.
3. Jestliže máte pacemaker, před používáním výrobku se poradte se svým lékařem nebo s výrobcem pacemaku.
4. Jestliže používáte jiné lékařské přístroje, používejte zařízení pouze v souladu s bezpečnostními pokyny svého lékaře nebo výrobce.

Bezpečnostní upozornění týkající se dobíjecí baterie li-pol

Baterie použitá ve výrobku „earis“ je lithium-polymerová baterie (li-pol) vyrobená v souladu s nejnovějšími standardy a bezpečnostními předpisy. Nesprávné použití nebo zacházení může baterii poškodit, za což společnost Humantechnik Group nepřijímá žádnou odpovědnost.

V extrémních případech hrozí:



- vznik tepla
 - požár
 - výbuch
 - emise kouře nebo plynu
-
- Baterii nevystavujte teplotám nad 70 °C, např. slunečnímu svitu ani ji neházejte do ohně.
 - Baterii nevystavujte vodě a kondenzaci.
 - Baterii nezkratujte.
 - Baterii nerozebírejte ani nedeformujte.
 - Zařízení / baterii skladujte na chladném a suchém místě při pokojové teplotě.
 - Používejte pouze nabíječky dodané k baterii.
 - Když baterii dlouho nepoužíváte, pravidelně jednotku dobíjejte (každých 6 měsíců přibližně 1 hodinu).
 - Baterii dobíjejte pouze při pokojové teplotě 10 °C až 40 °C.
 - Jestliže je zařízení zjevně vadné, baterii nedobíjejte.
 - Viz informace o záruce a likvidaci.


Úvod

Tato digitální bezdrátová sluchátka používají nejnovější digitální rádiovou technologii a umožňují zesílení zvuku.

Nová technologie „dynamic sound HS“ obsažená v této jednotce upravuje nastavení podle vašich osobních potřeb poslouchání. Užívejte si velmi jasného stereo zvuku a zvuku TV kdekoli v domě. Pozorně si prosím přečtěte uživatelskou příručku, abyste mohli zařízení správně nastavit a abyste se seznámili se všemi možnostmi, které nabízí.


Obsah balení

- 1 přijímač „earis“
- 1 vysílač „earis“
- 1 nabíjecí baterie
- 1 elektrické napájení s adaptérem pro danou zemi
- 1 pár pecek
- 1 kabel Toslink
- 1 audio spojovací kabel se stereo konektory 3,5 mm
- 1 audio adaptér RCA do stereo korektoru 3,5 mm
- 1 návod na použití

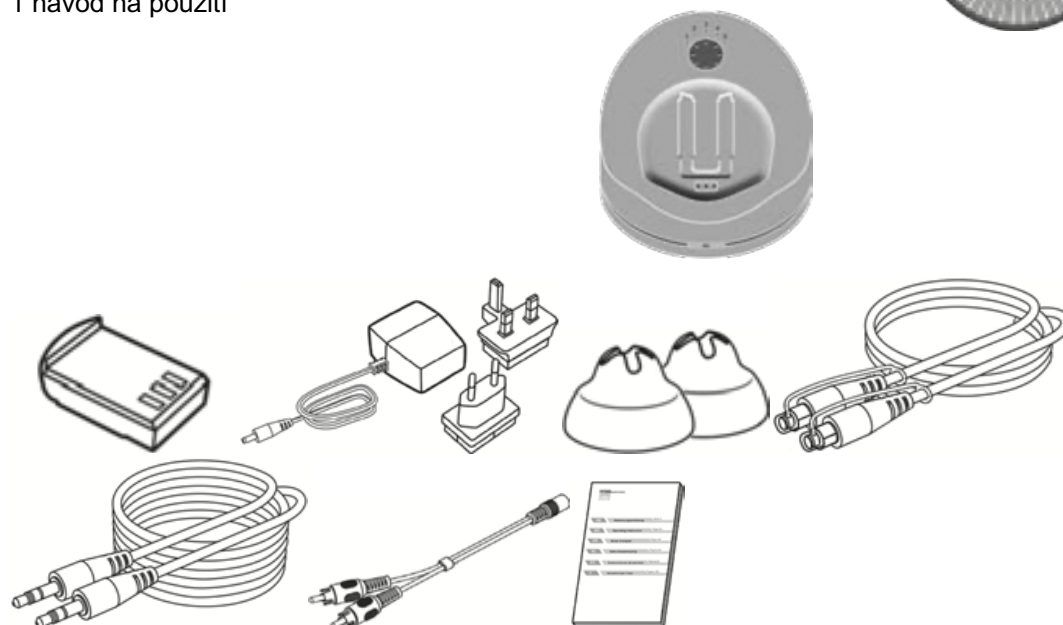


Přehled výrobku

Přehled: Přijímač pod bradu

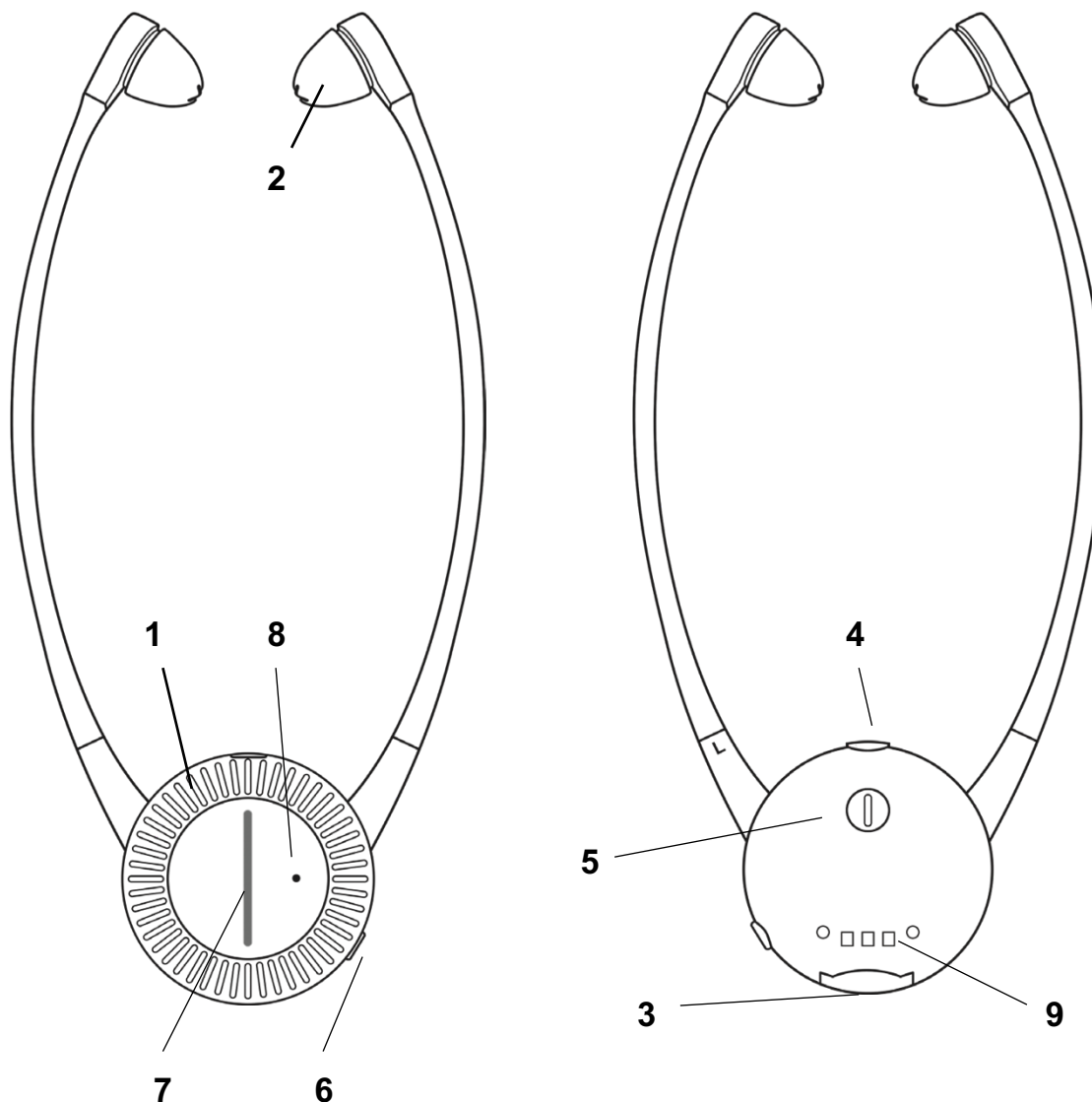

1. ovladač hlasitosti
2. sluchátka pecky
3. přihrádka baterie
4. stavová kontrolka LED / funkční tlačítko
5. seřizovač vyvážení
6. ovladač zvuku
7. indikátor hlasitosti
8. mikrofon
9. nabíjecí kontakty

Přehled: Vysílač

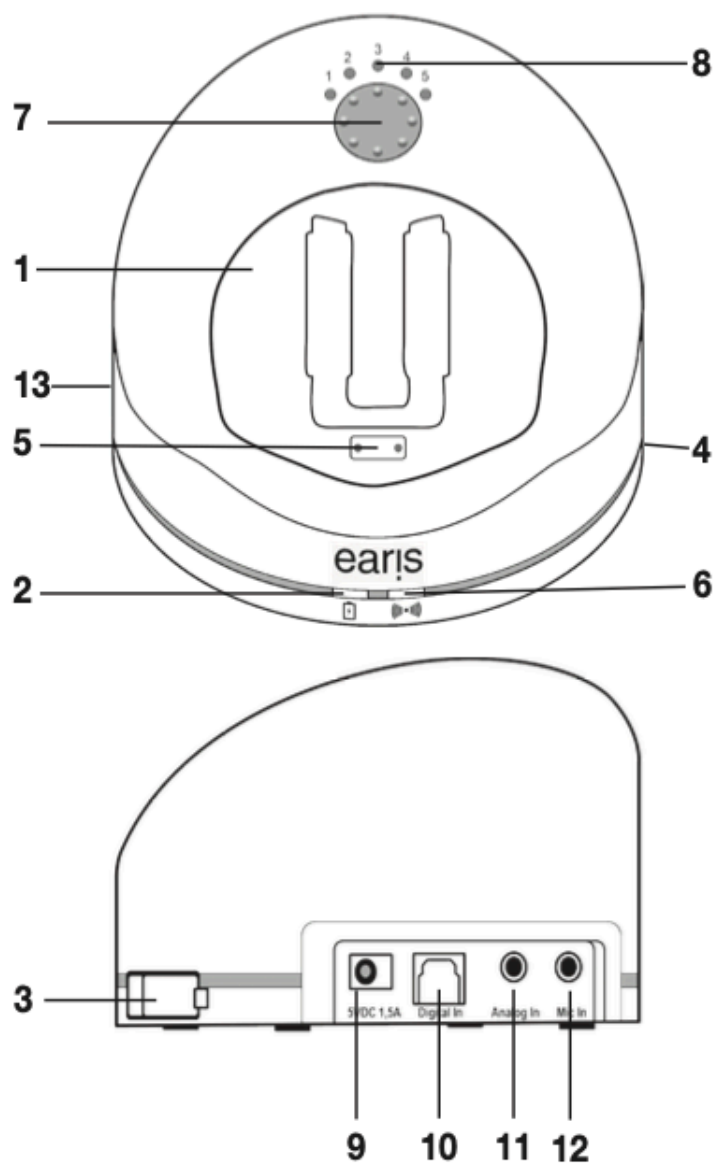

1. nabíjecí stanice
2. stavová kontrolka LED pro přijímač v nabíjecí stanici
3. nabíjecí přihrádka pro náhradní nabíjecí baterii
4. stavová kontrolka LED pro náhradní nabíjecí baterii
5. nabíjecí kontakty s opěrným magnetem
6. stavová kontrolka LED
7. ovladač zvuku / tlačítko párování
8. indikátor nastavení profilu zvuku
9. připojovací zdířka pro elektrické napájení
10. optický-digitální konektor Toslink
11. zdířka pro připojení analogových audio zdrojů (modrá)
12. zdířka pro připojení mikrofону (zelená)
13. volicí přepínač analogový / digitální

Přehled: stavová kontrolka LED na vysílači

Stavová kontrolka LED

tmavá
bílé světlo
bliká bílé světlo
bliká dvakrát bíle

Vysílač

... je vypnutý
... je zapnutý a vysílá
... je v režimu párování
... nemá signál PCM na digitálním vstupu

Přehled: stavová kontrolka LED na přijímači

Stavová kontrolka LED

tmavá
stálé zelené světlo
blikající zelené světlo

Přijímač

... je vypnutý
... je zapnutý a přijímá
... je v režimu mikrofonu

indikační sloupec hlasitosti bliká rychle

... je v režimu párování

Přehled: akustických alarmů

Akustický alarm

při použití: 1 pípnutí každých 30 sekund

při měnící se hlasitosti: 1 pípnutí

při měnící se hlasitosti: 2 pípnutí

při použití: 1 pípnutí každých 20 sekund

Význam

baterie je téměř vybita

dosažena maximální hlasitost

dosažena minimální hlasitost

přijímač je mimo dosah vysílání vysílače

Připojení vysílače k audio zdroji

Před připojováním vysílače vypněte audio zdroj. Dejte vysílač do blízkosti audio zdroje. Vysílač nedávejte do bezprostřední blízkosti silných armovaných betonových stěn a jiných radiových zařízení, dosah vysílání by mohl být nižší.

Máte několik možností, jak připojit zařízení „earis“ ke zdroji zvuku (např. TV, stereo sestava atd.).
Proveďte možnosti připojení svého audio zdroje.

Možnosti připojení:



- digitální výstup S/PDIF (Toslink)



- zdířky RCA



- konektor sluchátek



- reproduktor




- zdířka SCART

Připojení vysílače k digitálnímu výstupu (S/PDIF / Toslink)

Pro nejlepší kvalitu audia připojte vysílač ke svému zdroji audia pomocí optického (digitálního) kabelu Toslink.


Pamatujte na to, že digitální vstup může přenášet pouze audio zdroje ve standardu PCM / Stereo.

Viz příručku připojeného audio zdroje, kde zjistíte, jak nastavit digitální výstup.

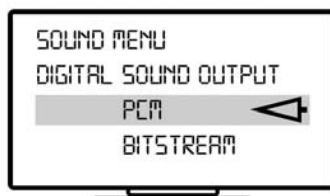

Audio přehrávání není možné, pokud používáte kombinovaný digitální signál (bitový tok). Stavová kontrolka LED na vysílači dvakrát zabliká, s pauzou mezi bliknutími, jestliže nebude k dispozici použitelný vstup digitálního signálu.

Sejměte ochranné krytky ze dvou konektorů Toslink na kabelu. Zapojte optický kabel Toslink do konektoru Digital In na vysílači a připojte jej ke svému audio zdroji. Přepínač analogový/digitální na levé straně vysílače musí být nastaven do polohy „Digital“.

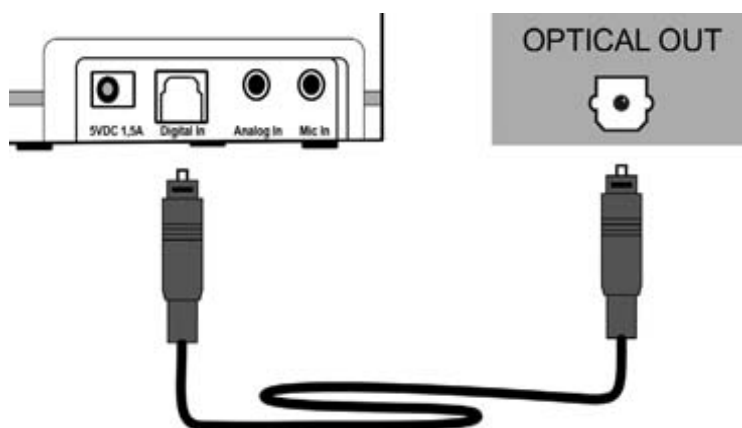


Připojení vysílače ke zdírkám RCA

Dobré kvality audia lze dosáhnout připojením vysílače k vašemu audio zdroji pomocí připojovacího kabelu analogového audia.

Zapojte dodaný kabel audio připojení do modré zdířky „Analog In“ na vysílači. Připojte připojovací kabel audia adaptéru RCA.

Připojte konektor RCA do zdířek RCA na vašem zdroji audia. Dbejte na to, aby bílý konektor byl připojen do bílé zdířky vašeho zdroje audia a červený konektor byl připojen do červené zdířky zdroje audia.

Přepínač analogový/digitální na levé straně vysílače musí být nastaven do polohy „Analog“.

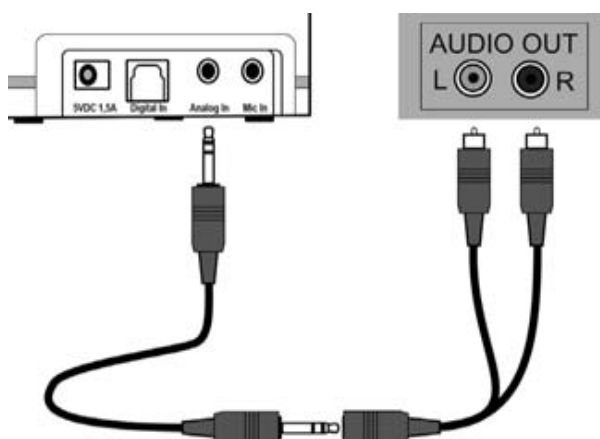


Připojení vysílače ke zdířce sluchátek

Zapojte dodaný kabel audio připojení do modré zdířky „Analog In“ na vysílači. Zapojte kabel připojení audia do zdířky sluchátek na vašem zdroji audia. Nastavte hlasitost svého zdroje zvuku na střední úroveň, pokud je to možné.

Některé televize vypínají reproduktory, když jsou do jejich konektoru sluchátek připojena zařízení. Na některých televizích lze toto automatické vypínání zvuku vypnout v menu nastavení televize.


Alternativně použijte jinou možnost pro připojení. Přepínač analogový/digitální na levé straně vysílače musí být nastaven do polohy „Analog“.

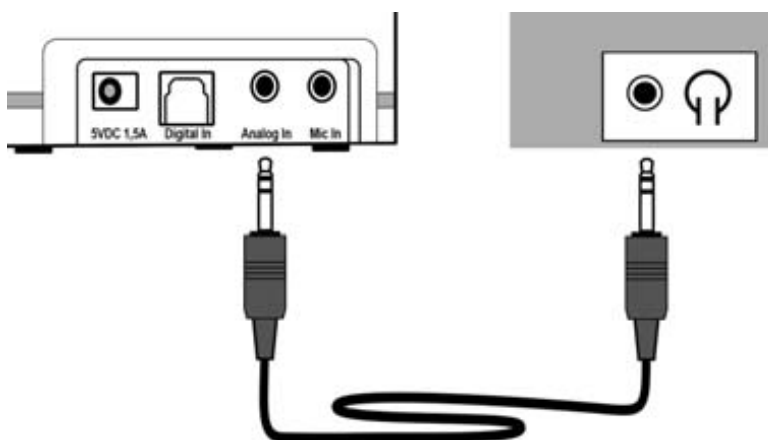

Připojení vysílače k reproduktoru

Vysílač může snímat zvuk z reproduktoru mikrofonom. Tento mikrofón není součástí dodávky a musíte jej zakoupit samostatně od svého prodejce. Lze použít pouze mikrofón „earis“. Zapojte mikrofón do zeleného konektoru „Mic In“ na vysílači. Připojte mikrofón k mřížce reproduktoru na vašem zdroji zvuku.

Všimněte si prosím, že hlasitost vašeho zdroje zvuku má přímý vliv na hlasitost přijímače. Všimněte si také prosím, že tato metoda připojení poskytuje nejnižší kvalitu audia ze všech možností. Přepínač analogový/digitální na levé straně vysílače musí být nastaven do polohy „Analog“.

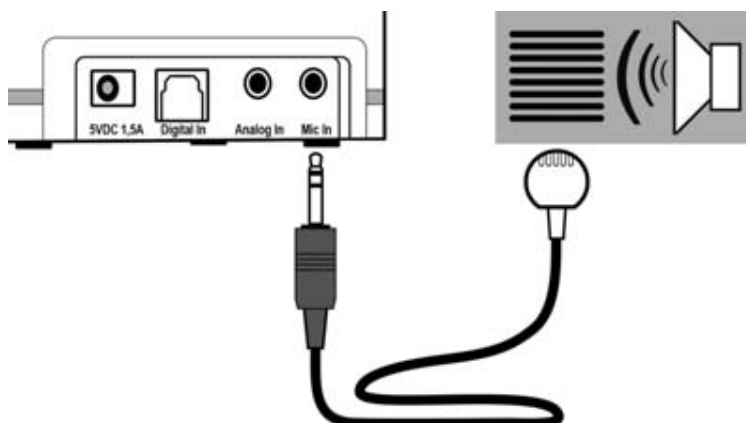

Připojení vysílače ke zdírce SCART


Adaptér SCART není zahrnut do dodávky a můžete jej zakoupit od specializovaného prodejce. Zapojte dodaný kabel audio připojení do modré zdírky „Analog In“ na vysílači. Připojte adaptér SCART připojovacím kabelem audia.

Zapojte adaptér SCART do zdírky SCART na svém zdroji audia. Přepínač analogový/digitální na levé straně vysílače musí být nastaven do polohy „Analog“.

Napájení vysílače


Vyberte adaptér vhodný pro danou zemi a připojte jej do elektrické napájecí jednotky, až zacvakne na místo.

Připojte elektrickou napájecí jednotku do vysílače se žlutou zásuvkou napájení „5V DC 1.5A“. Pak připojte elektrickou napájecí jednotku do elektrické zásuvky.

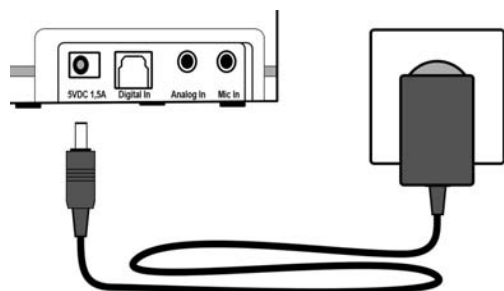

Použití dobíjecí baterie

Vložte dodanou baterii do přijímače s výstupkem směřujícím nahoru, až zacvakne na místo.

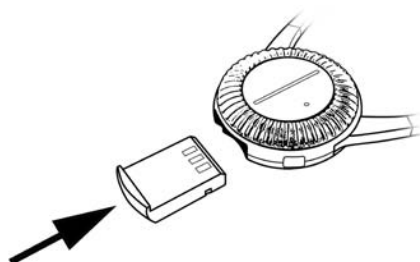


Před prvním použitím přijímač zcela a bez přerušení dobijte. Úplné dobití na 100 % trvá asi 4 hodiny.

Když je baterie vybita, stavová kontrolka LED na přijímači bliká a každých 30 sekund uslyšíte pípnutí. Pak se přijímač po několika minutách automaticky vypne.

Chcete-li baterii dobít, dejte přijímač do nabíjecí stanice na vysílači. Sloupec LED musí směřovat nahoru. Magnety udržují přijímač ve správné nabíjecí poloze.

Stavová kontrolka nabíjení LED na přední straně přijímače začne blikat červeně.


Stavová kontrolka nabíjení LED se změní na zelenou, jakmile bude baterie plně nabitá.

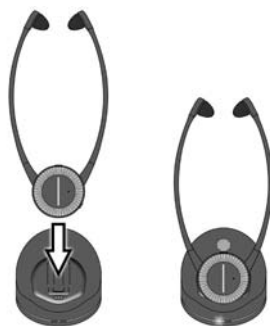

Doporučujeme, abyste vždy dávali přijímač do nabíjecí stanice vysílače, pokud zařízení nepoužíváte. Tím budete baterii stále udržovat v optimálních provozních podmínkách. Obvod inteligentního dobíjení v přijímači brání přílišnému nabíjení baterie.

Ve vysílači lze nabíjet i další baterii. Další baterie vám dodá váš prodejce. Náhradní baterii lze vložit do nabíjecího slotu na pravé straně - nejprve prosím sejměte kryt nad nabíjecím slotem. Ověřte, že vystouplý okraj směřuje nahoru a vložte baterii, aniž byste použili sílu. Při nabíjení stavová kontrolka nabíjení LED pro náhradní baterii svítí červeně a po úplném nabití se změní na zelenou. Baterie je pak připravena k použití.


Jestliže máte druhou baterii, doporučujeme vám, abyste jednou týdně baterie zaměňovali. Pak se obě budou pravidelně používat a dosáhnou své maximální životnosti.

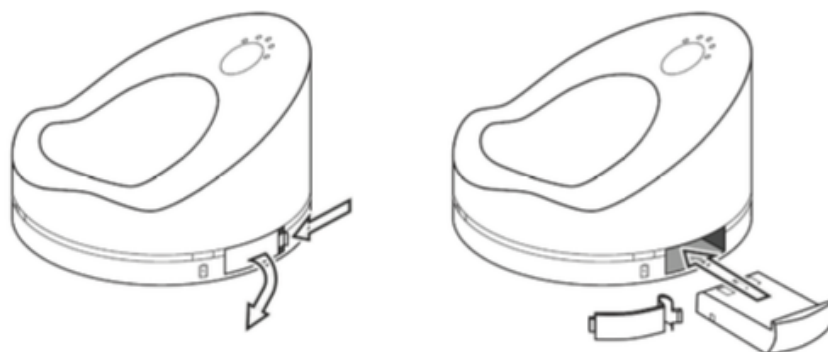

Pecky

Velké silikonové pecky ve stavu dodání se montují do ramen reproduktorů přijímače. Pokud vám tyto pecky nejsou pohodlné, naleznete v dodávce pár menších pecek. Chcete-li pecky vyměnit, jemně je stáhněte z ramen reproduktorů.

Pak opatrně nasadte jiné dvě pecky. Dbejte na to, aby pecky dobře a pevně dosedly.

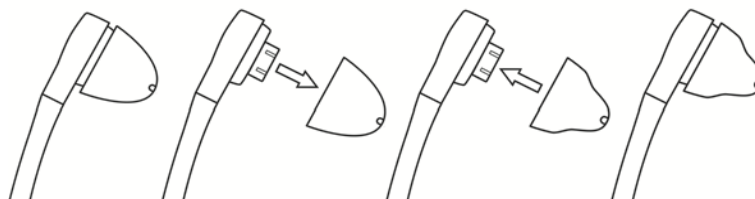

Pecky občas sejměte z přijímače a omyjte je jemnou mýdlovou vodou. Než pecky vyměníte, důkladně je osušte.

Velmi znečištěné nebo poškozené pecky byste měli vyměnit. Nové náhradní díly vám dodá váš speciální prodejce.

Používání zařízení „earis“ **Pozor:**

Váš přijímač může být nastaven na velmi vysokou hlasitost. Pro ochranu vašeho vlastního sluchu nebo sluchu lidí s běžným sluchem, zvláště dětí, před poškozením způsobeným nadměrnou hlasitostí dodržujte prosím následující pokyny:

1. Než začnete přijímač používat, nastavte jej na nízkou hlasitost.
2. Během používání upravte hlasitost na úroveň, která je vám pohodlná.
3. Nevystavujte se vysoké hlučnosti po dlouhou dobu.

Používání přijímače „earis“ pod bradu


Chcete-li používat přijímač „earis“, postupujte následovně:

1. Zapněte svůj audio zdroj (např. televizi). Jestliže je zařízení „earis“ připojeno konektorem sluchátek nebo je používáte s volitelným mikrofonom, měli byste nastavit hlasitost zdroje zvuku na střední úroveň. To není nutné, pokud je zařízení „earis“ připojeno pomocí Toslink nebo RCA.

2. Přijímač se automaticky zapne, když rozevřete ramena reproduktorů. Pomocí ovladače hlasitosti na přijímači nastavte hlasitost na nízkou úroveň, abyste chránili svůj sluch. Nízká úroveň hlasitosti je patrná z toho, že na indikátoru hlasitosti svítí pouze několik kontrolky LED. Čím více kontrolky LED na indikátoru hlasitosti svítí, tím vyšší je nastavená hlasitost.
3. Pecky nastavte tak, aby pohodlně seděly a byly bez tlaku přímo vepředu vašich sluchových kanálů. Sledujte značení „L“ a „R“ na horní straně ramen reproduktorů. Velké stříbrné kolečko hlasitosti by mělo pro snadnou obsluhu směřovat dopředu. Zapněte přijímač. Zelená stavová kontrolka LED na horní straně přijímače indikuje, zda je přijímač zapnut.
4. Bílá stavová kontrolka LED na vysílači se rozsvítí bíle, jakmile bude vysílač v kontaktu s přijímačem a přenos byl zahájen.
5. Upravte na požadovanou hlasitost.
6. Když přijímač vyjmete, automaticky se vypne. Doporučujeme vám, abyste přijímač vždy vraceli do nabíjecí stanice vysílače, aby baterie byla vždy nabitá. Jestliže do vysílače nedojde žádný audio signál po dobu delší než 5 minut, automaticky se vypne.


Výběr audio zdroje

Můžete připojit maximálně 2 audio zdroje k vysílači, například analogový stereo systém a digitální televizi. Spínačem výběru vstupu „Analog/ Digital“ na levé straně přijímače vyberte požadovaný audio zdroj.

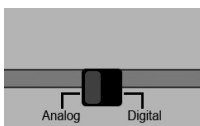

Nastavení hlasitosti


Otáčením stříbrného ovladače hlasitosti na přední straně přijímače snadno nastavte požadovanou hlasitost. Pruh LED ukazuje nastavenou hlasitost. Nízká úroveň hlasitosti je patrná z toho, že na indikačním pruhu hlasitosti svítí pouze několik kontrolky LED. Čím více kontrolky LED na indikátoru hlasitosti svítí, tím vyšší je nastavená hlasitost.

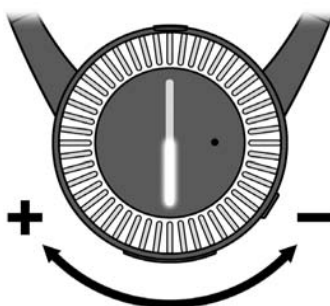

Nastavení vyvážení

Ovladač vyvážení umožňuje rozdělení hlasitosti mezi pravé a levé ucho. Upravte vyvážení tak, abyste v obou uších slyšeli stejně.

Ovladač vyvážení se nachází na zadní straně přijímače a lze jej otočit mincí.

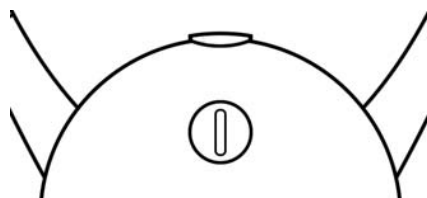

Použití funkce „dynamic sound HS“ ke zlepšení požitku ze zvuku

Funkcí „dynamic sound HS“ můžete nalézt ideální nastavení pro váš požitek ze zvuku. Integrovaná funkce „dynamic sound HS“ umožňuje pět volitelných profilů dynamického poslechu. Ty vždy počítají zvuk dynamicky podle příslušných nastavení a jsou zvláště vytvořeny pro uživatele se ztrátou sluchu. Funkce „dynamic sound HS“ je založena na algoritmu vyvinutém německým institutem Fraunhofer pro technologii digitálních médií IDMT v Oldenburgu, který představuje nejnovější inteligentní technologie pro zpracování zvuku. Vstupní signál se rozdělí na různá pásma a u každého pásma se změni jeho dynamický rozsah. Tato změna závisí na hlasitosti a zvukovém profilu vybraném na vysílači. Nakonec se zvuk individualizuje na samostatná frekvenční pásma. Jakmile se samostatná frekvenční pásma zkombinují tak, aby tvořila celkový signál, systém reprodukuje zvuk.

To se počítá dynamicky a kontinuálně v reálném čase, takže máte vždy zaručeno ideální nastavení. Reprodukce řeči se počítá jinak než například hudby.


Z 5 možností si můžete vybrat zvukový profil, který vám nejvíce vyhovuje. Vybraný profil se uloží.

Můžete vybrat následující profily:


1. velká změna zvuku v rozsahu nízkých frekvencí
2. malá změna zvuku v rozsahu nízkých frekvencí
3. beze změny
4. malá změna zvuku v rozsahu vysokých frekvencí
5. velká změna zvuku v rozsahu vysokých frekvencí

Existují dva způsoby, jak vybrat preferovaný zvukový profil:

1. Stisknutím tlačítka ovladače zvuku na **levé dolní straně** přijímače vyberte požadovaný profil. Nastavený profil můžete identifikovat na vysílači pomocí 5 LED indikujících zvukový profil.

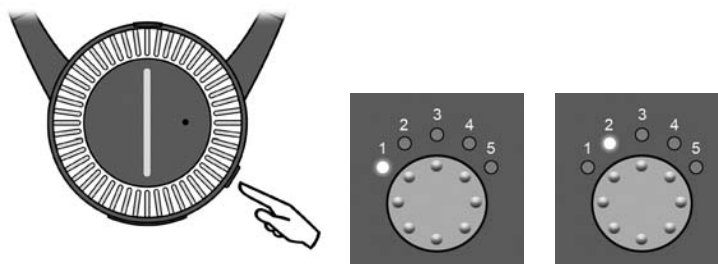

1. Stisknutím tlačítka ovladače zvuku na **horní straně** vysílače vyberte požadovaný profil. Nastavený profil můžete identifikovat na vysílači pomocí 5 LED indikujících zvukový profil.

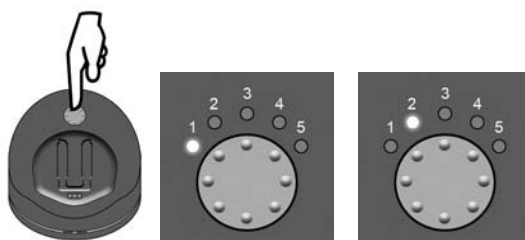

K jednomu vysílači „earis“ můžete připojit maximálně dva přijímače. Vysílač vypočítává zvukový profil, zatímco nastavené zvukové profily jsou uloženy v přijímači.

Vysílač vždy vypočítává nastavený zvukový profil přijímače, který je první zapnut.


Zesílení komunikace s přijímačem

Audio tok vysílání lze kdykoli přerušit, například pokud chcete mluvit s ně- jakou osobou v místnosti. Přijímač se připraví použít tuto funkci 2 sekundy po zapnutí.

Chcete-li to provést, jednou stiskněte tlačítko funkcí na horní straně přijímače. Integrovaný mikrofon přijímače nyní snímá zvuky prostředí a zesiluje je v přijímači. Hlasitost lze jako obvykle nastavit.

Chcete-li funkci ukončit, znovu stiskněte tlačítko funkcí, abyste obnovili předchozí vysílání. Pamatujte prosím, že nastavení hlasitosti mikrofonu není závislé na nastavení hlasitosti předchozího vysílání. Hlasitost, kterou nastavíte pro mikrofon, se uloží a použije, až jej příště aktivujete.

Funkce „dynamic sound HS“ se po zapnutí mikrofonu neaktivuje.

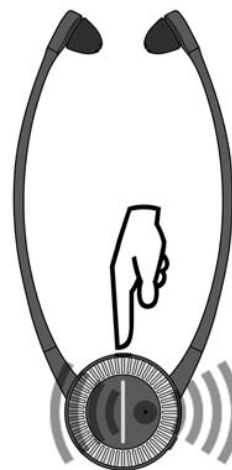

Párování vysílače a přijímače


Pokud má zařízení „earis“ fungovat správně, musí být vysílač a přijímač spárovány. Zpravidla to bylo provedeno při výrobě a standardně se to provádí při dodání.

Pokud však chcete používat jiný přijímač nebo později nějaký vyměníte, musíte jej nejprve spárovat s vysílačem.

S jedním vysílačem lze současně používat maximálně 2 přijímače.

Existují 2 možnosti, jak spárovat přijímač s vysílačem:

1. Když vložíte nový přijímač do nabíjecí stanice vysílače, automaticky se spárují.

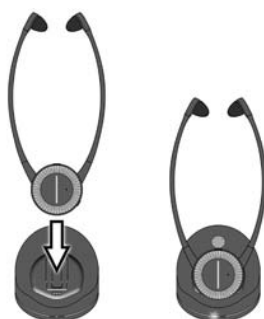

2. Stiskněte a přidržte tlačítko ovladače zvuku, až stavová kontrolka LED na přední straně vysílače začne rychle blikat.


Přijímač pod bradu: Vezměte si přijímač pod bradu, abyste jej zapnuli. Kapesní přijímač: Kapesní přijímač musíte vyndat z nabíjecí stanice, abyste jej zapnuli.


Stiskněte tlačítko funkcí na horní straně přijímače, až blikající stavová kontrolka LED na vysílači začne svítit stále. To ukazuje, že vysílač a přijímač jsou nyní spárovány.

Důležité poznámky

Vybavení je konstruováno pro poslech v domácím prostředí. Jiné použití je mimo rozsah použití tohoto výrobku. Na poškození nebo kontaminaci tohoto vybavení, které by bylo způsobeno používáním, jež není v souladu s tímto návodem, se nevztahuje záruka.

Zařízení nejsou vodotěsná a měli byste je držet mimo všechny tekutiny. Nedávejte je do blízkosti žádných zdrojů tepla. Na zařízení nedávejte žádné předměty, které by mohly způsobit jejich nesprávnou funkci.

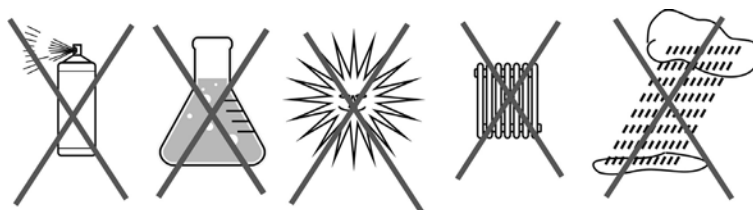

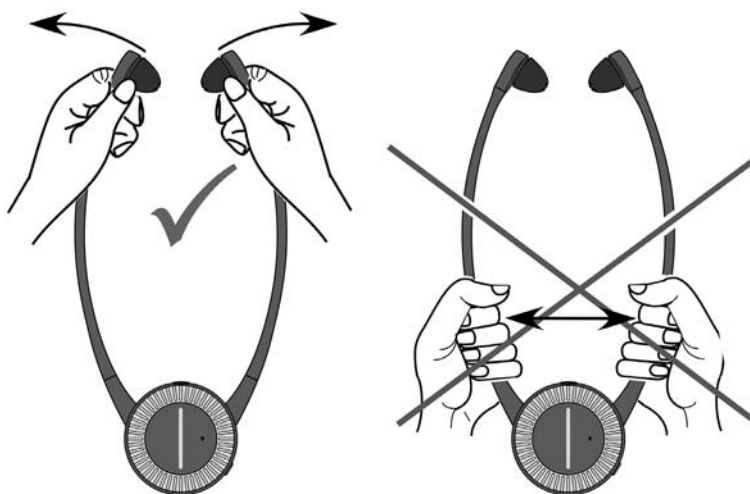

Záruka

Výrobek „earis“ je velmi spolehlivý. Pokud by se i při správném použití vyskytla porucha, viz prosím průvodce řešením problémů. Pokud to problém nevyřeší, kontaktujte prosím svého prodejce nebo přímo výrobce, abyste před vrácením čehokoli získali pomoc.

Záruka zahrnuje bezplatnou opravu a případně bezplatnou vratnou zásilku. Doporučujeme vám, abyste všechny položky vraceli v originálním obalu, takže si jej prosím uchovejte po dobu trvání záruky.

Tato záruka se nevztahuje na nesprávné používání, nesprávnou manipulaci ani pokusy o opravy neautorizovanými osobami (zlomená pečeť zařízení). Záruční opravy budou prováděny pouze tehdy, když prodejce nebo výrobce obdrží kupní doklad.

Při jakékoli události uvádějte číslo výrobku.

Ekologické informace / likvidace



Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

(platí v zemích Evropské unie a jiných evropských zemích se samostatným systémem sběru těchto zařízení).

Symbol na výrobku nebo na jeho obalu ukazuje, že tento výrobek nesmíte vyhodit jako běžný domovní odpad, ale musíte jej odevzdat do recyklační sběrný elektrických a elektronických zařízení nebo jej vyhodit do Žluté popelnice. Když přispíváte ke správné likvidaci tohoto výrobku, chráníte životní prostředí a zdraví svých bližních. Nesprávnou likvidací byste ohrožovali životní prostředí a zdraví osob.

Recyklace materiálů pomáhá snižovat spotřebu surovin.

Další informace o recyklaci tohoto výrobku získáte od své obce, sběrných firem nebo obchodu, kde jste výrobek zakoupili.

Baterie



Dodanou baterii lze recyklovat. Baterii laskavě vyhoďte do nádob na baterie nebo ve specializovaném obchodě.



Vyhazujte prosím pouze vybité baterie, abyste zaručili ochranu životního prostředí.



Tato zařízení odpovídají požadavkům následujících směrnic EU:

- 2011 / 65 / směrnice EU RoHS
- 2012 / 19 / směrnice EU WEEE
- 2014 / 53 / směrnice EU RED
- EN 301 489-17 V3.2.0: 2017B
- EN 301 489-1 V2.2.0: 2017
- EN 300 440 V2.1.1: 2017
- EN 62479: 2010
- 2014/35/ směrnice EU o nízkém napětí EN 60065: 2014

Shoda se směrnicemi uvedenými výše je potvrzena pečeti CE na zařízení. Prohlášení o shodě jsou k dispozici na internetu na adrese www.humantechnik.com/service

Technické změny vyhrazeny.

Řešení problémů

Symptomy	Příčina	Řešení
Stavová kontrolka LED nabíjení nesvítí, třebaže jste baterie vložili do nabíjecích stanic vysílače.	Vysílač není napájen z elektrické napájecí jednotky.	Zkontrolujte, zda je elektrická napájecí jednotka správně připojena a že elektrická zásuvka správně funguje.
Stavová kontrolka nabíjení LED nesvítí, třebaže je vložena baterie.	Není kontakt mezi baterií a nabíjecí stanicí ve vysílači.	Vložte baterie správně a zcela do vysílače. Zkontrolujte, zda jsou místa kontaktů čistá.
Stavová kontrolka nabíjení LED pro přijímač nesvítí, třebaže přijímač je vložen do nabíjecí stanice.	Není kontakt mezi baterií přijímače a nabíjecí stanicí vysílače.	Dbejte na to, aby přijímač byl správně umístěn do nabíjecí stanice.
Přijímač nefunguje, žádný přenos zvuku.	V přijímači není baterie.	Vložte do přijímače baterii.
	Přijímač není připojen nebo není správně připojen k televizi nebo stereo sestavě.	Zkontrolujte kabely a konektory mezi vysílačem a zdrojem audia.
	Televize nebo stereo sestava není zapnuta nebo výstup není správně nakonfigurován.	Zapněte zdroj audia nebo zkontrolujte nastavení.
	Párování bylo ztraceno	Spárujte vysílač a přijímač znovu.
Přijímač nefunguje, žádný přenos zvuku.	Přijímač není zapnutý. (kapesní verze)	Zapněte přijímač spínačem ZAP/VYP na boku zařízení. (kapesní verze)

Symptomy	Příčina	Řešení
	Baterie přijímače je vybita nebo není nabitá.	Baterii nabijte nebo vložte nabitou baterii.
Přenos zvuku je špatný, se šumem nebo rušený.	Přijímač je příliš daleko od vysílače.	Dejte přijímač blíž k vysílači.
Přenos zvuku vypadá zkreslený, ztlumený nebo rušený.	Baterie je téměř vybita.	Baterii nabijte nebo vložte nabitou baterii.
Přenos zvuku je na chvíli přerušen a pak pokračuje.	Přijímač je příliš daleko od vysílače. Okolní překážky brání přenosu (zdi, předměty).	Dejte přijímač blíž k vysílači.
Baterie vydrží pouze chvíli.	Baterie není plně nabitá nebo je vadná, a proto nemůže dále pracovat.	Baterii nabijte, vložte plně nabitou baterii nebo novou plně nabitou baterii.

Specifikace

Souprava Earis

Modulace:	Pulzní kódová modulace PCM analogová-přes-digitální
Nosná frekvence:	2,4 GHz ~ 2,5 GHz
Odstup signál-šum:	-87 dB
RF výstupní výkon:	10dBm
Audio latence:	<47 ms
Pracovní dosah:	cca 70 m
Teplotní rozsah:	0 °C až 45 °C
Příkon:	5 voltů DC / 1,5 A
Elektrické napájení:	100-240 voltů, 50-60 Hz 300 mA

Přijímač Earis

THD:	1 kHz <1 % při 500 mVrms
Frekvenční odezva:	20-16 kHz
Hladina akustického tlaku:	122 dB SPL při vstupu= 1 KHz / 500 mVrms
Materiál pecek:	Silikon
Příkon:	Akku AP18A 3,7 V 400 mAh Lithium-Polymer
Pracovní doba:	cca 9 h
Nabíjení:	cca 2 h
Hmotnost (vč.dobíjecí baterie):	61 g
Rozměry:	244 mm x 112,5 mm x 24 mm
Teplotní rozsah:	0 °C až 45 °C