

Sprej pro sluchadla a ušní tvarovky (59ml)



Pokyny pro používání

Pro vyčištění sluchadla nebo ušní tvarovky nastříkejte malé množství roztoku na měkký papír nebo látku a rozetřete tekutinu po povrchu sluchadla nebo ušní tvarovky. V žádném případě nestříkejte roztok přímo na sluchadlo ani ho do roztoku neponožte!

Upozornění:

Může způsobit podráždění očí a kůže.

Při požití je draví škodlivý

Obsahuje prostředek pro snadné čištění povrchů. V případě, že se vám roztok dostane do očí, vypláchněte je vodou a požádejte o pomoc lékaře. Při kontaktu s kůží stačí zasažené místo umýt mýdlem a vodou. Potřísněné oděvy vyperte. Při požití vypijte velké množství vody a kontaktujte lékaře.

Udržujte z dosahu dětí