

GEEMARC

CLEAR SOUND[®]

HEAR THE DIFFERENCE

PhotoPHONE 100

Telefon se zesílením zvuku a obrazovou identifikací volajících osob



Česky



Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.

Palackého třída 114, 612 00 Brno,

Telefon: 541 245 321,

E-Mail: unb@cmjn.cz

www.pomuckyproneslysici.cz

OBSAH	1
ÚVOD	3
Rozbalení telefonu	4
POPIS	5
Všeobecný popis	6
INSTALACE	7
Nastavení, připevnění na zeď	7
NASTAVENÍ	8
Nastavení vyzvánění	8
Nastavení „FLASH“	8
Hlasitost příjmu a vyvážení zvuku	8
Nastavení Indukční smyčky	9
UŽÍVÁNÍ TELEFONU	10
Volání	10
Příjem hovoru	10
Opakované vytáčení	11
Funkce MUTE	12
Měřič hovoru	12
Užití sluchadla	12
Signál FLASH	12

Uložení čísla	13
Ukládání čísla do paměti	13
Vytáčení čísla z paměti	13
Řešení potíží	14
Bezpečnostní informace	14
Záruka	15
Adresa	16

Blahopřejeme k zakoupení telefonu GEERMARC PHOTOPHONE 100. Jedná se o zesílený telefon s velkými tlačítky. Klávesnice je dobře viditelná a snadno použitelná, čímž pomáhá zabraňovat jakémukoliv omylu. Jsou zde tlačítka pro vytáčení s fotografií, která byla navržena pro zjednodušení volání, protože budete schopni spojit tyto rychlá vytáčení tlačítka s obrázky vašich přátel nebo rodiny. Telefon je možné používat se sluchadlem.

Přečtěte si následující instrukce, abyste využili plný potenciál vašeho GEMARC telefonu. Pro příští použití uložte návod na bezpečné místo

Manuál vysvětluje, jak používat následující telefon:



PHOTOPHONE 100


Obsah balení telefonu



Po rozbalení telefonu byste měli najít následující položky

- 1 - PHOTOPHONE 100
- 1 - PHOTOPHONE 100 sluchátko s točeným kabelem
- 1 - Telefonní kabel
- 1 - Návod k použití



Všeobecný popis

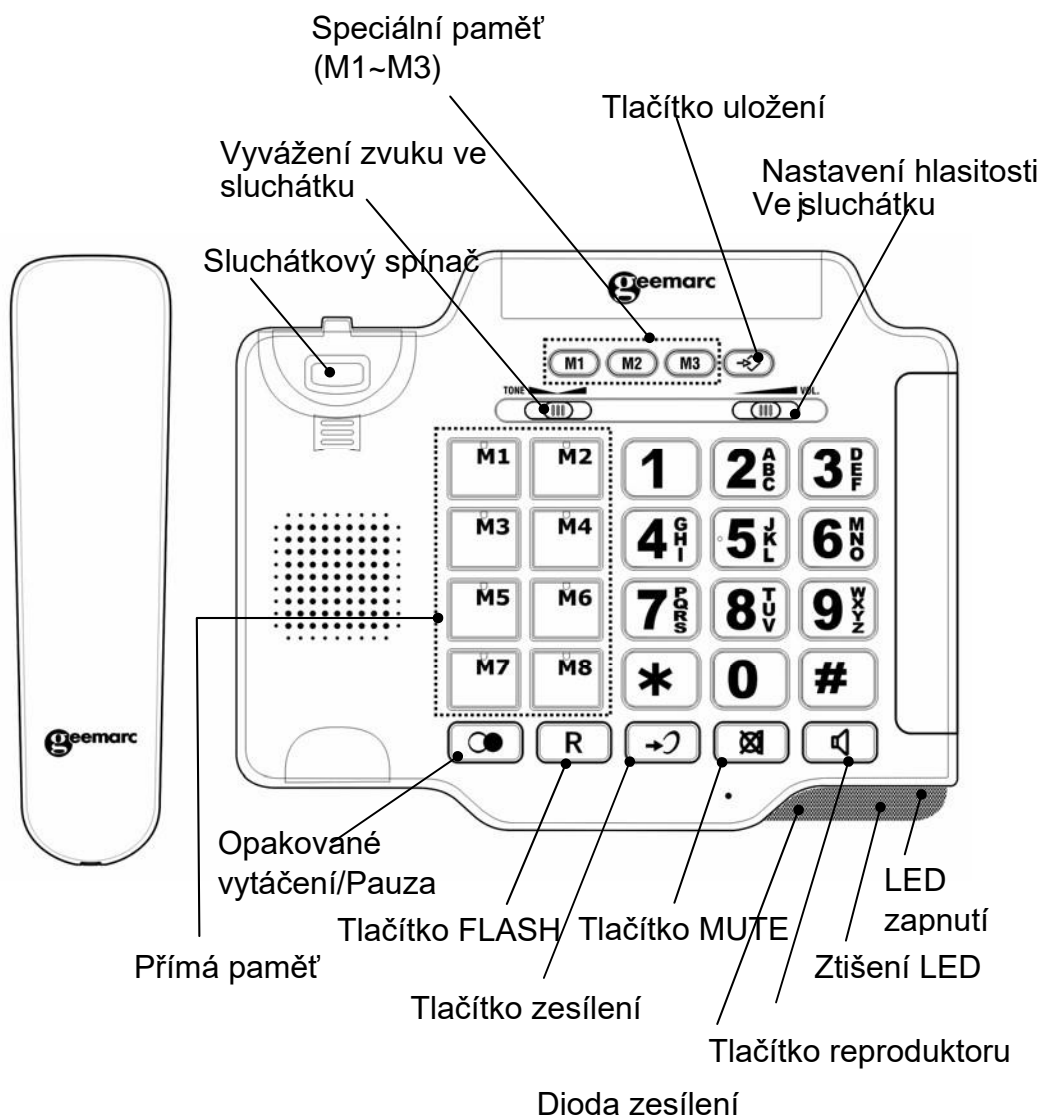

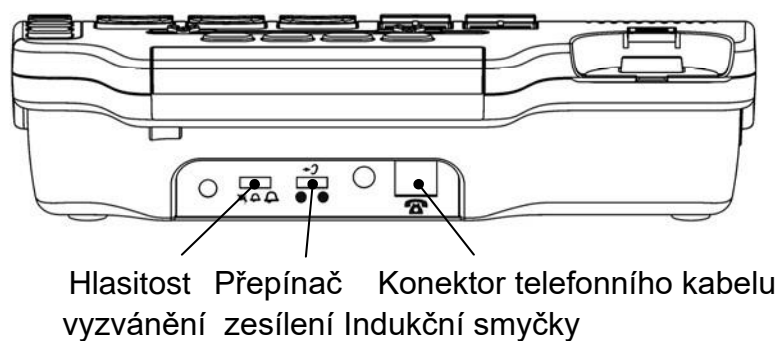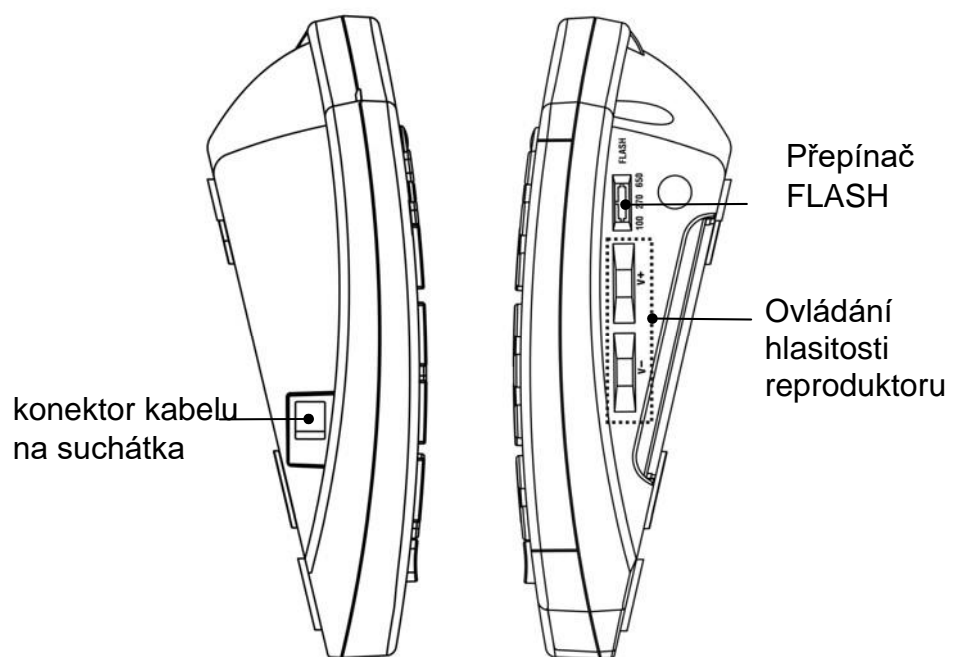

Nastavení

Připojte sluchátko k jednomu konci. Druhý konec kabelu zastrčte do konektoru na levé straně PHOTOPHONU 100. Umístěte sluchátko na držák vidlice.

Zapojte telefonní linku do konektoru umístěného na zadní části telefonu. Druhý konec do telefonní zásuvky (na zdi).

Upevnění na stěnu


Vysuňte západku telefonu a změňte její pozici (otočte ji o 180°) Zasuňte západku zpět tak, aby směřovala nahoru (obrázek 1). Tak sluchátko nespadne z vidlice, když se telefon připevní na stěnu.

Svisle navrtajte do zdi 2 šrouby s hmoždinkami ve vzdálenosti 80 mm. (Šrouby nejsou součástí balení)

Umístěte telefon na hlavičky šroubů a posuňte směrem dolů, abyste jej bezpečně usadili. (obrázek 2)

Obrázek 1

Obrázek 2

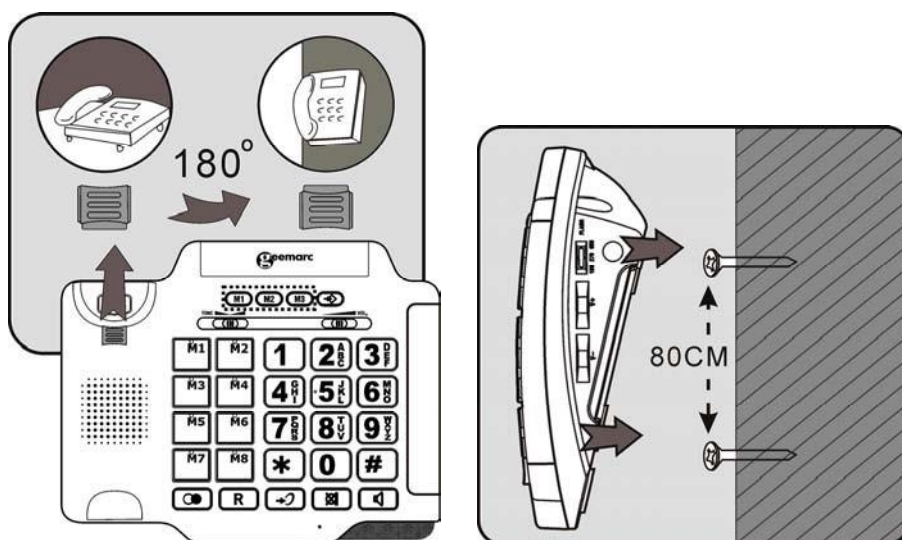

Nastavení

Nastavení vyzvánění

Přepínač umístěný v zadní části Photopohonu 100 umožňuje nastavení zvonění na HI (hlasité zvonění), LO (tiché zvonění), OFF (zvonění vypnuto) když nechcete být obtěžováni

Nastavení FLASH




Můžete upravit čas bliknutí užitím přepínače umístěného na pravé straně telefonu. Dostupné jsou tři úrovně 100ms, 270ms a 650ms. Váš telefon je nastaven na 100ms.


Hlasitost příjmu a vyvážení zvuku

Můžete změnit hlasitost přijímaného hovoru a zvuk během konverzace podle vašich sluchových požadavků.


K úpravě použijte posuvný regulátor hlasitosti na horní části telefonu. Dostupný rozsah je 0-15dB



Tlačítko zesílení  na telefonu poskytuje dodatečné rozšíření rozsahu. Nastavení hlasitosti bude 15- 30dB. Když je funkce zesílení aktivována, LED dioda zesílení svítí.

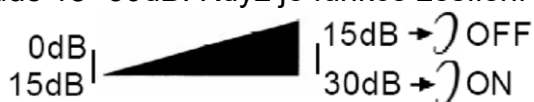


Výchozí nastavení pro zesílení


Přepínač Zesílení ON/OFF  umístěný na zadní straně telefonu umožňuje nastavit výchozí stav. Tak bude zařízení zapnuto nebo vypnuto pokaždé, když jej použijete.

Nastavení indukční smyčky

Přepínač aktivace indukční smyčky ON/OFF v pozici ON



Dodatečné zesílení a ovládání tónu jsou automaticky aktivní pokaždé, když použijete telefon. Led dioda zesílení bude při použití telefonu rozsvícená.


Zmáčknutí tlačítka zesílení →  během hovoru vypne dodatečné zesílení a ovládání tónu indukční smyčky. Nicméně, stále můžete přizpůsobovat přijímanou hlasitost ve sluchátku regulátorem hlasitosti.

Bez ohledu na to kolikrát zmáčknete tlačítko zesílení →  během hovoru, následně když zvednete sluchátko pro nový hovor, tyto funkce budou znovu aktivovány


Přepínač zesílení ON/OFF na pozici OFF

Dodatečné zesílení a ovládání tónu jsou deaktivovány při každém použití telefonu. LED dioda zesílení při užívání telefonu nesvítí.

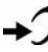Jedno zmáčknutí tlačítka zesílení →  během hovoru umožní kontrolu tónu a dodatečné zesílení. LED dioda se rozsvítí a bude značit tuto změnu. Pokud stisknete tlačítko zesílení →  ještě jednou dodatečné zesílení a vlastnosti kontroly tónu se znovu vypnou

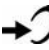Bez ohledu na to kolikrát stisknete klávesu zesílení →  během hovoru, při dalším zvednutí sluchátka budou tyto funkce opět vypnuty.

Nastavení tónu zvuku

Pokud je zesílená hlasitost příjmu, může se upravovat také vyvážení zvuku TONE . Můžete upravit a zvýšit nízkofrekvenční nebo vysokofrekvenční zvuky Posuvným regulátorem v horní části přístroje.

Bass +10db max  Treble +10db max

Poznámka: Funkce upravení tónu nebude mít efekt, pokud je hlasitost příjmu nastavena na normální úroveň..

Nastavení hlasitého odposlechu

V režimu handsfree můžete upravit hlasitost reproduktoru pomocí ovladačů hlasitosti V+ nebo V- umístěných na pravé straně telefonu.

Užívání telefonu


Volání

Zvedněte sluchátko

Až uslyšíte vyzváněcí tón, zadejte číslo na klávesnici


Pro ukončení hovoru zavěste sluchátko na vidlici

Volání- handsfree

Zmáčkněte tlačítko  a uslyšíte vyzváněcí tón

Vytočte číslo na klávesnici

Pro ukončení hovoru stiskněte znovu 

Pro aktivaci handsfree funkce během hovoru zmáčkněte tlačítko reproduktoru  a zároveň zavěste sluchátko na vidlici

Pro deaktivaci funkce handsfree během hovoru zvedněte sluchátko

Poznámka: V režimu handsfree smí do telefonu mluvit pouze jedna osoba. Přepojení mezi reproduktorem a mikrofonom je automatické. To závisí na úrovni zvuku příchozího hovoru a mikrofonomu. Je proto nezbytné aby v blízkosti telefonu nebyly žádné hlasité zvuky, např. hudba v bezprostřední blízkosti telefonu naruší funkci handsfree.

Příjem hovoru

Když je přijímán příchozí hovor, telefon zvoní a rozsvítí se LED dioda příchozího hovoru.

Zvedněte sluchátko a mluvejte

Pro ukončení hovoru vraťte sluchátko na vidlici


Příjem hovoru- handsfree


Pro aktivaci handsfree zmáčkněte  a mluvejte

Pro ukončení hovoru zmáčkněte 

Užívání telefonu

Opakovaná volba posledního volaného čísla


Zvedněte sluchátko nebo zmáčkněte  pro handsfree

Zmáčkněte  pro opakovanou volbu posledního volaného čísla.

Užívání telefonu

Funkce MUTE

Funkce MUTE se používá, pokud si přejete mluvit primárně k někomu dalšímu v místnosti tak, aby vás neslyšel volající. Vy volajícího slyšíte, ale on nemůže slyšet vás.

Pro zapnutí funkce MUTE během hovoru jednou zmáčkněte tlačítko **MUTE**  (LED dioda MUTE se rozsvítí). Volající nebude schopen vás slyšet

Pro obnovení konverzace opět zmáčkněte  (led dioda MUTE se vypne).

Měřič hovoru

Vaše sluchátko automaticky měří trvání každého hovoru. Čas se ukazuje během hovoru a několik sekund po jeho ukončení.

Použití sluchadla

Tento telefon je slučitelný s naslouchátkem. Nastavte T režim na vašem naslouchátku pro umožnění této vlastnosti

Flash Signál


Tlačítko FLASH můžete použít při čekání na hovor, pokud voláte prostřednictvím ústředny.

Uložení čísla

Ukládání čísla do paměti

Na telefonu se nachází 11 paměťových tlačítek (M1, M2, M3 a 8 tlačítek na fotografii). Fotografie vašich kontaktů můžete vložit pod plexisklo na tlačítku. Tato možnost je velmi užitečná, pokud máte tendenci zapomínat telefonní čísla nebo jména.

Zvedněte sluchátko

Zmáčkněte. → Zadejte telefonní číslo, které chcete uložit (do 32 čísel). Pokud je to požadováno zmáčkněte tlačítko  pro vložení pauzy.

Zmáčkněte požadované paměťové umístění (M1, M2, M3 nebo jedno z 8 tlačítek s fotografií)

Znovu zmáčkněte →. Telefonní číslo bude uloženo do paměti.

Vložení nového čísla do paměťového umístění, které je již obsazeno automaticky vymaže původní číslo.

Obsah paměťové karty je umístěn na základně, takže si můžete poznačit umístění telefonních čísel.

Vytáčení čísla z paměti

Zvedněte sluchátko

Zmáčkněte požadované paměťové umístění (M1, M2, M3 nebo jedno z 8 tlačítek s fotografií)

Telefonní číslo bude vytočeno automaticky

Řešení potíží

Photophone 100 nezvoní

- Ujistěte se, že je telefonní kabel zapojen správně a není poškozen.
- Připojte jiný telefon do zásuvky nebo přesuňte váš telefon do jiné zásuvky, abyste zjistili zda je poškozen váš telefon nebo PPT zásuvka.
- Mnoho dalších zařízení může být zapojeno do jedné telefonní linky např. další telefon, modem nebo fax. Kontaktujte poskytovatele sítě pro pomoc s výpočtem limitu pro vaši domácí nebo firemní linku.
- Ujistěte se, že vaše nastavení vyzvánění není přepnuto na OFF

Žádný vyzváněcí tón

- Ujistěte se, že je telefonní kabel zapojen správně a není poškozen
- Připojte jiný telefon do zásuvky nebo přesuňte váš telefon do jiné zásuvky, abyste zjistili zda je poškozen váš telefon nebo PPT zásuvka.
- Mnoho dalších zařízení může být zapojeno do jedné telefonní linky např. další telefon, modem nebo fax. Kontaktujte poskytovatele sítě pro pomoc s výpočtem limitu pro vaši domácí nebo firemní linku.

Všeobecné informace

Neotvírejte telefon. Kontaktujte servis pro všechny opravy.

Čištění

Telefon utírejte jemnou tkaninou. Nepoužívejte leštidla ani čisticí prostředky mohou poškodit povrch nebo elektroniku uvnitř.

Prostředí

Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Ujistěte se, že kolem telefonu je volný průtok vzduchu

Žádnou část telefonu nepokládejte do vody a nepoužívejte telefon ve vlhkém prostředí např. v koupelně.

Nevystavujte výrobek ohni nebo jiným nebezpečným vlivům

Během bouřky odpojte telefon ze zásuvky, protože může být poškozen. Záruka nepokrývá poškození telefonu bouřkou.

Telefon je vytvořen pro práci v teplotách od 5°C do 45°C

Záruka

Koupí přístroje Photophone100 získáváte záruku 2 roky.

Během této doby máte bezplatně nárok na všechny opravy a dle našeho uvážení i výměny.

V případě problémů kontaktujte prodejce. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená nedbalostí, nevhodným zacházením nebo rozbitím kterékoliv části. Přístroj nesmí být porušen nebo rozebrán kýmkoliv bez oprávnění firmy Unie neslyšících Brno, sociální podnik s.r.o.

Záruční podmínky, nijak neomezují vaše práva.

UPOZORNĚNÍ: VÁŠ PARAGON JE SOUČÁSTÍ ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK A MUSÍ BÝT PŘEDLOŽEN V PŘÍPADĚ REKLAMACE.

PROHLÁŠENÍ: Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o. prohlašuje, že jeho produkt vyhovuje základním požadavkům a příslušným ustanovením „Radio and Terminal Equipment Directive 1999/EEC“, článku č. 3 odstavec 1a, 1b a 3. Telefon nefunguje při proudu menším než 18 mA.

Elektrické připojení:

Telefonní připojení: napětí je klasifikováno jako TNV-3 dle EN60950.

Adresa



Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o

Palackého třída 114, 612 00 Brno,

Telefon: 541 245 321,

email: unb@cmjn.cz

www.pomuckyproneslysici.cz



For product support and help visit our website at www.geemarc.com