

Výběr režim poslechu

- Stiskněte a podržte funkční tlačítko déle než 3 sekundy. Rozsvítí se bílá LED dioda, následovaná barevnou LED diodou označující aktuální režim.
- Pomocí tlačítek + a - můžete procházet 7 dostupných režimů sluchu.
- Chcete-li uložit vybraný režim, krátce stiskněte funkční tlačítko. LED dioda třikrát zabliká na potvrzení.



Připojení sluchátek přes Bluetooth

- Když je zařízení zapnuté, červená kontrolka Bluetooth bliká.
- Pokud v tuto chvíli otevřete pouzdro sluchátek, sluchátka se automaticky připojí a červená kontrolka zhasne.

Ovládání hlavní hlasitosti

- Stiskněte tlačítko +. Rozsvítí se bílá LED dioda a hlasitost se zvýší.
- Stiskněte tlačítko -. Rozsvítí se bílá LED dioda a hlasitost se sníží.

● Minimum (1) ○ Střed (2–15) ● Maximum (16)

Nezávislé ovládání hlasitosti

- Stiskněte a podržte tlačítko + pro vstup do režimu ovládání hlasitosti na pravé straně. Stiskněte a podržte tlačítko - pro vstup do režimu ovládání hlasitosti na levé straně.
- Po aktivaci režimu se rozsvítí žlutá LED dioda. Pomocí tlačítek + a - nastavte hlasitost.
- Pro uložení nastavení stiskněte funkční tlačítko. Žlutá LED dioda zhasne a zelená LED dioda dvakrát zabliká na potvrzení.

Funkce ztlumení

- Stisknutím funkčního tlačítka ztlumíte mikrofon a rozsvítí se žlutá LED dioda.
- Dalším stisknutím tlačítka ztlumení zrušíte a žlutá LED dioda zhasne.

Použití externího vstupu


- Připojte zdroj zvuku k portu USB-C, podržte tlačítko + a zapněte zařízení, abyste mohli poslouchat zvuk přes sluchátka.



Bluetooth® LE Audio



GENIESORI

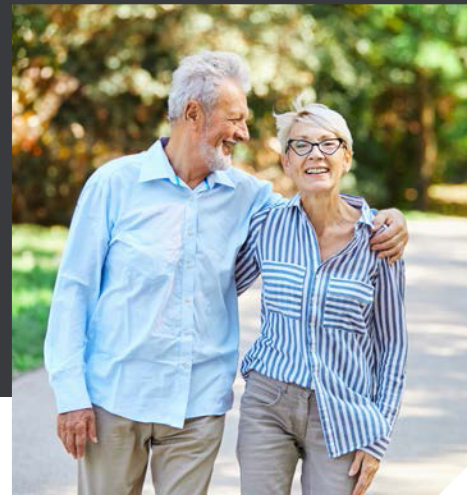

Premiové asistenční sluchové zařízení

GENIESORI3 (GLE)


Uživatelská příručka

Zažijte křišťálově čistý zvuk díky spojení technologie sluchadel a bezdrátového zvuku nové generace.



GENIESORI III

Přehled produktu

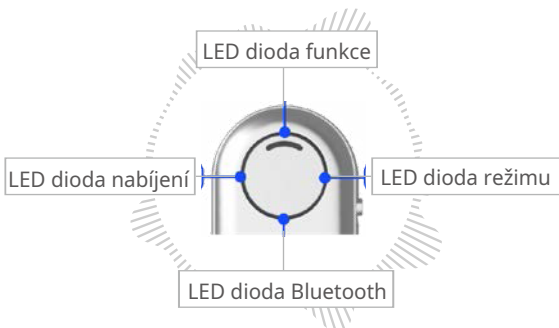

UWICOM

Vaše přání je mi rozkazem

Zapnutí a vypnutí

- Zařízení zapnete posunutím vypínače do polohy ON. Funkční LED dioda třikrát zabliká, aby signalizovala stav baterie.
- Zařízení vypnete posunutím vypínače do polohy OFF.



● Nízký stav baterie ● Střední úroveň ● Plně nabitá

Nabíjení baterie

- Zapojte nabíječku do portu USB typu C.
- Červená kontrolka stavu nabíjení svítí během nabíjení a po úplném nabití se rozsvítí zelená.



Připojení nových sluchátek

Tuto funkci použijte k odpojení aktuálních sluchátek a připojení nových.

- 1 Stiskněte a podržte funkční tlačítko déle než 10 sekund. LED dioda změní barvu z bílé na červenou.
- 2 Když svítí červená LED dioda, vypněte napájení. Aktuální připojení sluchátek bude přerušeno.
- 3 Nastavte nové sluchátka do režimu párování.
- 4 Znovu zapněte GENIESORI 3. Automaticky se připojí k novým sluchátkům.
- 5 Tento produkt podporuje pouze Bluetooth LE
- 6  Audio.
- 6 Ujistěte se, že vaše sluchátka podporují LE Audio.

Informace o produktu

- Certifikace: KC, CE
- Rozměry: Š 28.2 × V 82 × H 12.2 (mm)
- Hmotnost: 27g
- Bluetooth Verze: 5.3
- Kapacita baterie: 3.7V 550mAh
- Provozní teplota: -10 to 50 °C

Informace o produktu

- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může způsobit poškození sluchu.
- Produkt neupouštějte a nerozebírejte.
- Chraňte zařízení před vodou, vlhkostí, a extrémními teplotami.
- Nesprávná výměna baterie může způsobit nebezpečí výbuchu. Dodržujte správný postup při likvidaci a výměně baterie.

Unie Neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.

Palackého třída 19/114, 612 00 Brno

TEL. +420 725 605 216, +420 541 245 321/ Email: info@unb.cz

Web: <https://www.pomuckyproneslysici.cz/>

Výrobce: UWICOM Co., Ltd.

Web: www.uwicom.com