




oto·fresh®  
DRY BOX


RYCHLÉ ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI  
360° UV-C LIGHT

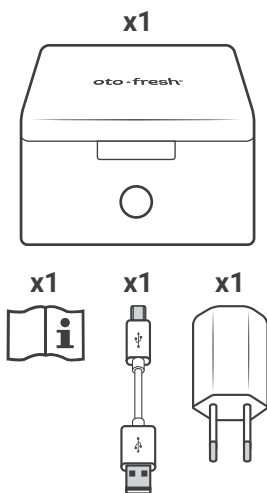

Pro použití se všemi s druhy sluchadel, včetně dobíjecích

- 1 Připojte DRYoto·fresh BOX .  
Svítil modrá LED dioda zapnutí zařízení. Pokud se neuskuteční žádná akce po dobu 30 vteřin, zařízení se samo vypne.
- 2 Ujistěte se, že je kryt zařízení uzavřen před spuštěním procesu sušení. Zároveň se ujistěte, že bude kryt uzavřen po celou dobu procesu vysoušení , v opačném případě se sušicí box vypne.

oto·fresh DRY BOX je vhodný pro všechny typy sluchadel včetně dobíjecích sluchadel.

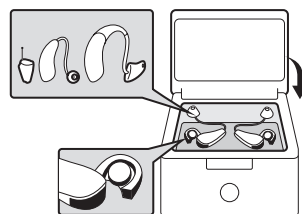


vyčistěte svá sluchadla pomocí čistícího ubrousku, odstraňte přebytečné nečistoty. Poté otevřete přihrádku na baterie ve sluchadlech (baterie mohou být během cyklu ponechány uvnitř sluchadel). Umístěte sluchadla do sušicího boxu a uzavřete kryt.

- 3 Jedním stisknutím dotykového tlačítka spustíte proces vysoušení. Modrý indikátor pomalu bliká, což znamená, že box běží. Cyklus bude probíhat pouze v případě, že je kryt zavřený. Dry box Oto·fresh se automaticky zastaví na konci cyklu údržby (45 minut). Indikátor zhasne



Modrá bliká > Vysoušení běží  
Modrá svítí > Připraven k provozu

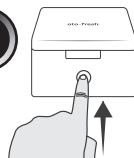

Funkce:  
UV-C 360°

oto·fresh DRY BOX s krátkovlnnou UV-C lampou

Kruhové vysoušení 360 st. umožňuje dosáhnout na celý povrch sluchadla. Péče o naslouchátko je zajištěna kombinací odvlhčováním s horkým vzduchem pulzovaným ventilátorem a 360 st. UV-C . První se rozsvítí lampa po dobu pěti minut cyklu údržby a poté se automaticky vypne.

Vysoušení:

DRY box má patentovaný pulzní systém odvlhčování vzduchu. To znamená, že se zkracuje potřebný výkon a doba sušení. Teplota sušicí komory je řízena elektronickým systémem tak, aby byla zachována maximální teplota 35 C bez ohledu na pokojovou teplotu, čímž se zabrání poškození čistěných sluchadel. Pro zachování optimální kvality sluchadla se důrazně doporučuje každodenní používání sušicího boxu.

Bezpečnostní instrukce:

Držte mimo dosah dětí. Jakékoli jiné práce než čištění a běžná péče ze strany klienta musí být provedeny zákaznickým servisem výrobce nebo schváleným odborníkem. Neumísťujte DRYbox napájecí kabel nebo zástrčku do zásuvky ani jinou tekutinu. Pokud dojde k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky, zařízení nepoužívejte a okamžitě odpovězte. Vyměňte síťový adaptér za originální model. Suchý box umístěte na rovný, suchý a stabilní povrch. Nedívejte se přímo na UV-C lampu umístěnou v odvlhčovací komoře. Při odpojování tahejte za zástrčku a ne za kabel. K čištění suchého boxu nikdy nepoužívejte saponáty ani korozivní prostředky. Nedodržením těchto instrukcí ztrácíte záruku. Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím nebo manipulací.

**Jak pečovat o produkt :** Čistěte měkkým hadříkem. Do zařízení nestříkejte tekutiny. udržujte suchou skříň uzavřenou, když se nepoužívá, aby se zabránilo usazování nečistot.

**Nařízení platné pro zdravotnické prostředky:**

Tento produkt splňuje požadavky nařízení (EU) 2017/745 týkající se zdravotnických prostředků.

**Záruka:**

36 měsíců - (včetně kabelu a transformátoru). V případě poruchy se obraťte na odborníka na sluchadla. Během záruční doby bude zákaznický servis vyžadovat doklad o zakoupení všech prací. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nehodou nebo nehodou nebo podobným poškozením, vniknutím kapaliny, nedbalostí, nevhodným použitím, demontáží jakéhokoli druhu, nedostatkem péče nebo jakoukoli okolností způsobenou uživatelem. Dále se tato záruka nevztahuje na škody způsobené bleskem nebo jinou změnou elektrického napětí. V případě bouřky jako preventivní opatření odpojte suchou skříň.

**Identifikační údaje**

Význam zkratk:

|     |                                                                                                                                                                                                            |         |                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|
| CE  | Zařízení je v souladu s předpisy nařízení (EU) 2017/745 týkající se zdravotních prostředků .                                                                                                               |         |                                |
| 📖   | Viz návod k použití / brožura                                                                                                                                                                              |         |                                |
| 🏭   | Výrobce                                                                                                                                                                                                    | 📅       | Datum výroby                   |
| SN  | Výrobní číslo                                                                                                                                                                                              | MD      | Zdravotnické zařízení          |
| REF | Katalogový odkaz                                                                                                                                                                                           | SV-0.4A | stejnoseměrný proud            |
| LOT | Šarže                                                                                                                                                                                                      | 🏠       | pro použití v krytém prostředí |
| ♻️  | Vyrobeno z ABS s recyklačním kódem 77                                                                                                                                                                      | ♻️      | třídění odpadu                 |
| 🗑️  | Likvidace - staré spotřebiče zlikvidujte ekologicky. Staré obsahují recyklovatelné materiály, které musí být znovu využity. Zajištění proto likvidaci starých zařízení pomocí příslušného sběrného systému |         |                                |

Technická data:

Rozměry

Vnitřní (bwxzd): 70 x 21 x 51 mm  
Vnější (twwxd): 93 x 48 x 76 mm  
Váha (g): 144 g  
UV lampy: 253.7 nm  
Max. napětí: 4 W  
Klidové napětí: 0,04 W  
Skladovací podmínky v rozpětí: -20 °C to +65 °C

Sušicí teplota 35 °C (95 °F) C  
Délka vysoušení: 45 min.  
Okolní provozní teplota: Od 12 °C do 40 °C  
Napájení:  
Vstup : 100-240 Vac 50-60 Hz /  
Výstup: 5 Vdc  
Připojení: USB cable - micro USB



I protect the environment, I disconnect my drybox Lux once my hearing aids are clean!

Pokud se setkáte s problémy, kontaktujte sluchadlového odborníka. Všechny vážné incidenty související s přístrojem by měly být předmětem oznámení výrobci a příslušným orgánům v členském státě, ve kterém se uživatel nachází.

Art.-Nr. 6127  
6127 | 0518-0 | @bachmaier®

MADE IN EU

